



Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu

Desprej[®] płyn

Zalety

- szerokie spektrum działania
- krótki czas działania
- gotowy do użycia
- opakowanie ze zintegrowanym spryskiwaczem
- nie wymaga spłukiwania
- możliwość użycia na oddziałach noworodkowych

Właściwości produktu

desprej[®] jest preparatem na bazie mieszaniny alkoholi i czwartorzędowych soli amoniowych przeznaczonym do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych, w tym powierzchni trudnodostępnych oraz powierzchni urządzeń i sprzętu medycznego niewrażliwych na działania alkoholi.

Działa bakteriobójczo (w tym wobec MRSA), drożdżakobójczo, grzybobójczo, prątkobójczo, wirusobójczo wobec BVDV, wirusa vaccinia, adenowirusa, rotawirusa, norowirusa oraz wirusa polio.

Wskazówki dotyczące stosowania

Dezynfekowane powierzchnie należy spryskać preparatem lub przetrzeć chusteczką zwilżoną preparatem.

Dezynfekowana powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez cały czas wymagany do osiągnięcia skuteczności bójczej. Po upływie wymaganego czasu działania powierzchnia wysycha lub nadmiar preparatu należy usunąć za pomocą suchej chusteczki jednorazowego użytku.



Dane produktu

100 g preparatu zawiera: etanol - 45 g, propan-2-ol - 30g, chlorek didecyldimetyloamoniowy (DDAC) - 0,5g

Wskazówki szczególne

Przechowywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w oryginalnych, dobrze zamkniętych pojemnikach. Temperatura magazynowania: od -10 do +25 st. C, nie przechowywać bezpośrednio na słońcu.

Termin ważności: 3 lata

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
Desprej 500 ml FL	20/Karton	70000209
Desprej płyn -PL/HU- 1 l FL	1/Karton	70000071
Desprej 5 l KA	1/Kanister	70000210

Badania i informacje

Na życzenie dostarczymy niezbędne raporty dotyczące preparatu.



Firma Schulke CZ s.r.o. jest posiadaczem certyfikatów ISO 13485 oraz ISO 9001.