

Meliseptol® rapid



Dezynfekcja powierzchni

- Wyjątkowo efektywnie działanie w krótkim czasie
- Do stosowania na oddziałach noworodkowych
- Do stosowania w pionie żywieniowym
- Doskonałe właściwości myjące

Meliseptol[®] rapid

Preparat do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych

Charakterystyka

Meliseptol Rapid jest szybko działającym, gotowym do użycia środkiem dezynfekującym opartym na alkoholu, znajdującym zastosowanie do dezynfekcji sprzętu medycznego, łóżek szpitalnych, pokryw materaców, foteli zabiegowych i innych małych, odpornych na alkohol powierzchni w gabinetach lekarskich, stomatologicznych i w szpitalach. Meliseptol[®] Rapid jest używany wszędzie tam, gdzie zarówno sprzęt medyczny, jak i powierzchnie muszą być szybko i skutecznie zdezynfekowane.

Właściwości

- oparty na alkoholu i chlorku dwudecyldwumetyloamoniowym
- wyjątkowo efektywnie działa przeciwko bakteriom, grzybom i wirusom
- nie zawiera aldehydu i alkiloamin
- posiada przyjemny i dyskretny zapach
- dermatologicznie przebadany
- do stosowania na oddziałach noworodkowych
- do stosowania w pionie żywieniowym
- posiada bardzo dobre właściwości myjące

Zastosowanie

- Zwilżyć powierzchnię nierozcieńczonym roztworem, pokrywając ją całkowicie płynem, pozostawić do wyschnięcia do 1 min.
- Urządzenia elektryczne muszą być wyłączone przed procesem dezynfekcji.
- Gorące powierzchnie muszą być schłodzone przed dezynfekcją.
- Materiały wrażliwe na działanie alkoholu (np. pleksiglas) należy

najpierw przetestować pod kątem odporności na działanie Meliseptolu rapid.

- W profilaktyce zakażeń krzyżowych w szpitalach i gabinetach lekarskich: czas ekspozycji 1 minuta (DGHM).
- Do inaktywacji wirusów Papowa: czas ekspozycji wydłużyć do 5 minut.
- Do inaktywacji wirusów Polio: czas ekspozycji wydłużyć do 10 minut (dwukrotne zwilżenie powierzchni dezynfekowanej).

Skuteczność mikrobiologiczna

Meliseptol Rapid wykazuje działanie bakterio- (w tym MRSA), prątko-, grzybo- i wirusobójcze.

Mikroorganizmy	Czas działania
Bakterie, grzyby	15 s.
MRSA	30 s.
Prątki	30 s.
HCV	1 min.
HIV	15 s.
HBV	15 s.
Rota wirus	1 min.
Adeno wirus	1 min.
Vaccinia wirus	30 s.
Polio wirus	10 min.
Noro	1 min.
Wirus Ptasiej Grypy typu A- H7N1	15 s.

Dostępne opakowania

Numer katalogowy

Butelka 250 ml z atomizerem	19047
Butelka 1 liter	19048
kanister 5L	19049



Meliseptol Rapid[®] – skład

100g roztworu zawiera:

1-propanol 50.0 g, chlorek dwudecyldwumetyloamoniowy 0.075 g
substancje zapachowe