

Aplikacja zestawu do odłączenia dializy Matoset


Przykład zestawu do odłączenia dializy MA-991-ZEST-488.




1. Przed zakończeniem procedury należy umyć ręce (specjalista).




2. Należy otworzyć set do zakończenia procedury.

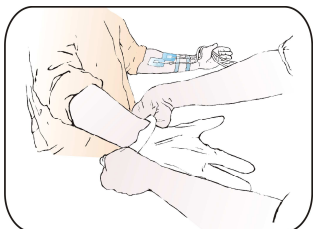



3. Założyć jedną rękawicę pacjentowi.

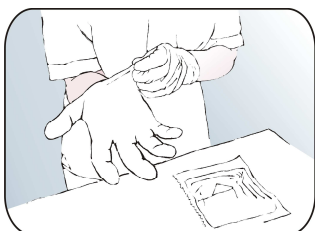

4. Następnie specjalista zakłada obydwie rękawice.

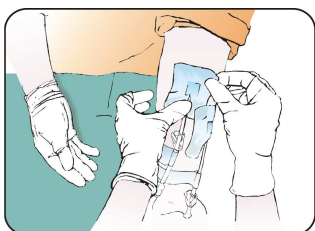

5. Kolejno usunąć kaniule, korzystając przy tym z pomocy pacjenta do podtrzymania kompresu w celu zabezpieczenia wkluc kompresami.

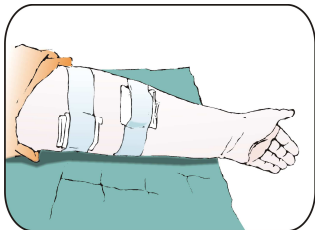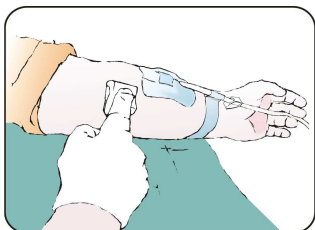

6. Po usunięciu obu kaniul wklucia należy zabezpieczyć opatrunkami z kompresów włókninowych i przylepców.